



Neuheiten 2021

# Neuheiten, so bunt wie der Herbst.



## Jetzt wird's bunt.

Passend zur Jahreszeit präsentieren wir Ihnen unsere vielfältigen Produktentwicklungen. Neuheiten, so farbenfroh wie der Herbst.

Unser anpassungsfähiges Rückenschrägliegebrett **till.** ist eine echte Innovation mit großem Nutzen! Um **till.** noch besser zu machen, wurde weiteres Zubehör entwickelt. Heute präsentieren wir Ihnen den neuen multifunktionalen Tisch sowie die Schiebepumpe, die es möglich macht, das Rückenschrägliegebrett komfortabel zu bewegen.

Der wendige Stehtrainer **todd.** überzeugt durch den neu verbauten Schwenkarmbeckenrahmen.

In ein neues Licht rücken wir den Dusch- und Toilettenstuhl **hts.:** Wieso den **hts.** nicht mal mit Badewannenuntergestell als Duschsitz verwenden und ihn damit noch vielseitiger und bunter einsetzen?

Auch den Gehtrainer **dynamic pacer.** beleuchten wir neu: Mit smartem Zubehör, wie den neuen Handgriffen und dem Multipositionierungssattel MPS, überzeugt er in der Light-Variante. Und ist damit der perfekte Begleiter für Kinder und Jugendliche in den GMFCS Klassen 2 und 3.

Viel Herzblut floss insbesondere in die Entwicklung unseres flexiblen Kniepelottensystems **FKP.!** Voller Stolz präsentieren wir Ihnen heute unser brandneues Zubehör zum Stabilisieren und Korrigieren der Knie. Unsere **FKP.** sparen die Patella aus und vermeiden damit Druckstellen und beugen Schmerzen vor.

Ebenso innovativ ist unsere neue Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung. Denn sie kann sowohl den Kopf enger führen und damit mehr Halt und Unterstützung bieten als auch Freiraum zulassen für mehr Bewegung und Dynamik. Auch asymmetrische Einstellungen sind möglich. Der Kugelkopf erlaubt eine genaue Positionierbarkeit und bietet die individuellen Halt, den der Nutzer braucht!

Größtmögliche Selbstständigkeit bieten unsere neue Fußschalen für unsere Drei- und Fahrräder sowie für die Therapiestühle. Dank Magnetschloss können Kinder/Jugendliche die neu entwickelten Fußschalen selbst öffnen und schließen. Die flexiblen und weichen Gurte schmiegen sich an und sind leicht an eventuell vorhandene Anomalien im Fuß- und Wadenbereich anpassbar.

## Gehen + Fahren.



**dynamic pacer.**  
als Light-Version  
4-7

## Stehen + Transfer.



**till.**  
8-11



**todd.**  
Schwenkarmbeckenrahmen  
12-15

## Bad + Toilette.



**hts.**  
als Duschsitz  
16-19

## Zubehör.



**Fußschalen.**  
20-23



**Kopfstütze.**  
24-27



**FKP.**  
28-31



 **FKP.**  
flexible knee positioning

**Inhalt.**





# dynamic pacer. als Light-Version.



**Ich bin Dein dynamischer Gehtrainer.** Du möchtest laufen, rennen oder sogar toben? Auch mit meinem smarten Zubehör mache ich einen tollen Job, auch ganz ohne Vollausrüstung. Manchmal ist weniger mehr. Es reichen da schon die neuen Handgriffe, die Brustanlage und der Multi-Positionierungs-Sattel (MPS). Damit bin ich gerüstet und eine klasse Unterstützung für Dich während der Therapiestunde, im Unterricht oder in der Freizeit. Übrigens gibt es den MPS auch in einer kleinen Größe. Dank der werkzeugfreien Bedienung lasse ich mich kinderleicht einstellen und passe mich Dir perfekt an. Sowohl bei der neuen Brustanlage als auch bei den Handgriffen. Und ja, gerne begleite ich Dich von Anfang an. Mit mir kannst Du erste Schritte machen und die Welt entdecken, wenn Du älter und größer wirst. Denn mich gibt es in mehreren Größen und falls nötig, auch mit weiterem Zubehör. Mein optionaler dynamischer Oberrahmen unterstützt Dich bei der Gewichtsübernahme und -verlagerung, die für ein ergonomisches Gangbild nötig sind.



# dynamic pacer.

**Als Neuerung möchte ich Dir meine Brustanlage vorstellen. In Kombination mit den ebenfalls neuen Handgriffen biete ich Dir so ganz andere Möglichkeiten bei der Positionierung.**



## **Mein Multi-Positionierungs-Sattel (MPS) wird Dich begeistern:**

Mit ihm kann Deine Beckenposition so schnell und fein in unterschiedliche Richtungen eingestellt werden, dass Aufrichtung, Schrittlänge und Gewichtsübernahme an Dich angepasst werden können. Mit der richtigen Einstellung der Satteltiefe wird zum Beispiel Dein Becken in eine optimale Position in Bezug zum Oberkörper gebracht. Mithilfe des Sattelwinkels wird Dein Becken in eine Vor- oder Rücklage gebracht. Die Hüftanlage lässt sich in Höhe und Tiefe verändern, damit Deine Hüfte den notwendigen Halt bekommt. Und mit der Sattelhöhe erfolgt eine Feineinstellung der Beckenposition, sodass Du selbst bestimmen kannst, wie viel von Deinem Körpergewicht der MPS übernehmen soll. Toll, oder?

Rahmenfarbe  Limettengrün  
Gr. 0 mini

Rahmenfarben  Weiß  
Gr. 1  Limettengrün

Rahmenfarben  Weiß  
Gr. 2  Rot

Rahmenfarben  Blau  
Gr. 3  Anthrazit

Rahmenfarbe  Anthrazit  
Gr. 4

# Die Vorteile vom dynamic pacer.

7



**Multi-Positionierungs-Sattel**  
passt sich schnell an die  
Beckenposition an.

**dynamischer Oberrahmen**  
unterstützt das Gangbild und lässt  
eine vertikale Bewegung von 8 cm  
und eine horizontale Bewegung  
von 5 cm während des Gehens zu.

**Mittelsäule**  
kann dank Gasdruckfeder in der Höhe  
verändert werden und unterstützt bei  
der Aufrichtung in den Stand.

**leichte und stabile Bauweise**  
vermittelt Sicherheit.

**Richtungsfeststeller**  
unterstützen das  
Geradausgehen.

**Laufrollen**  
mit Schleifbremse, Rücklaufstopp,  
Feststellbremse und Richtungsfeststeller.

**Distanzmesser**  
zeichnet den  
Therapiefortschritt auf.



„In diesem Video präsentiere ich das neue, tolle Zubehör für den **dynamic pacer**. als Light-Version. Schauen Sie doch mal rein!“

**Hauke Fistera**

Außendienstmitarbeiterin & Orthopädietechnikermeisterin






## Positioniert Dich gut.

### **Ich bin Dein anpassungsfähiges Rückenschrägliegebrett.**

Mit mir ist Dein Transfer von der liegenden in die stehende Position sicher und komfortabel möglich – auch wenn Du nur wenig aktiv mitmachen kannst. Ich passe mich über meine vielfältigen Einstellmöglichkeiten Deinen besonderen Körperformen sehr genau an – und das von Kopf bis Fuß. Regelmäßiges Stehen wirkt sich positiv auf Deine Körperstrukturen und -funktionen aus und fördert Deine Aktivitäten. Dabei unterstütze ich Dich und biete Dir zugleich Sicherheit und Gewichtsübernahme. Mit mir hast Du eine neue Perspektive – Du bist mit Deinen Freunden auf Augenhöhe und kannst mit mir geschoben werden. So ist die Teilhabe in verschiedenen Situationen und Positionen während des Stehtrainings möglich.

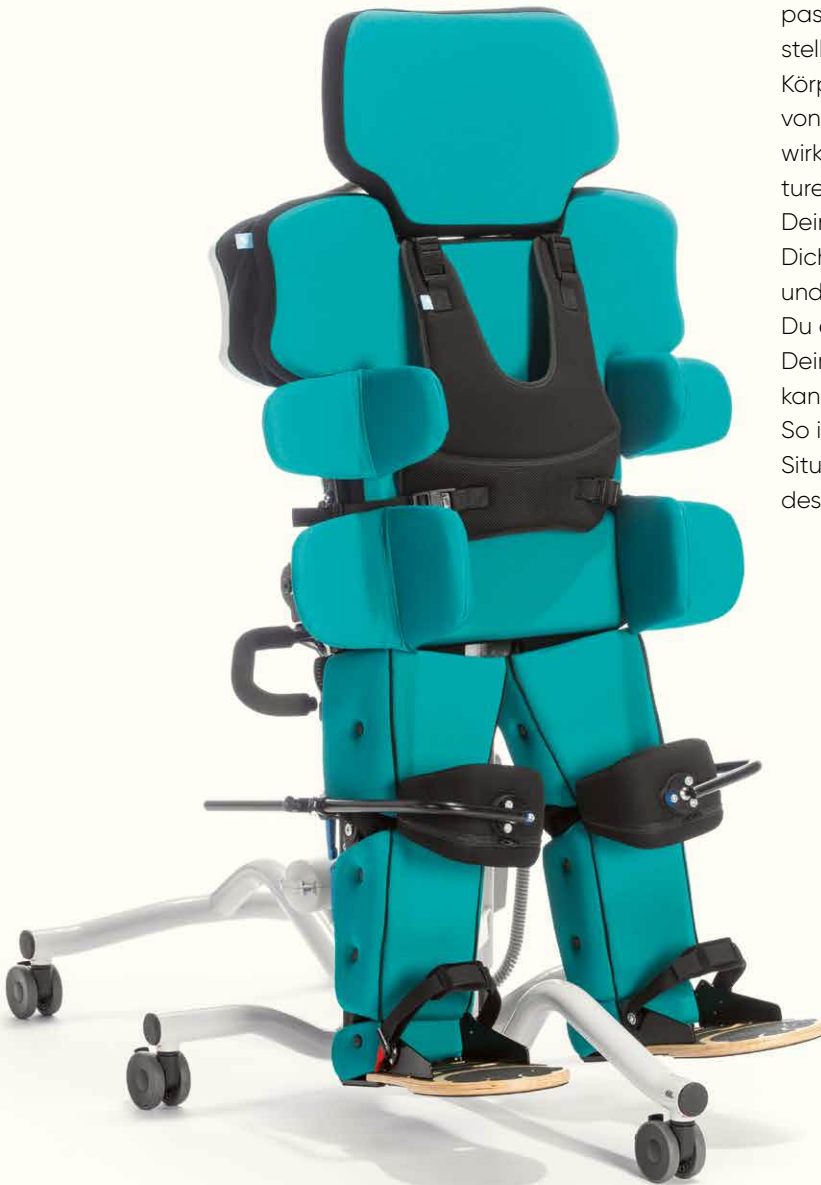






**Als Neuerung möchte ich Dir meine neue Schiebestange vorstellen. Damit kann ich komfortabel durch den Raum bewegt werden. Ohne große Mühe und Anstrengung.**




### **Mein neuer Tisch wird dich begeistern:**

Ich lasse mich schnell und einfach in der Höhe verstellen und genau dorthin, wo Du mich brauchst. Damit Dein Spielzeug nicht von mir herunterfällt, bin ich mit einem Rand ausgestattet. Ich bin echt flexibel durch meine Verstellmöglichkeiten in Tiefe, Höhe und Winkel. Und das nicht nur über das Tischgestänge, sondern auch über eine Schnellverstellung! Meine hochwertige Fertigung aus lasiertem Buchenholz macht mich zu einem langlebigen Begleiter.

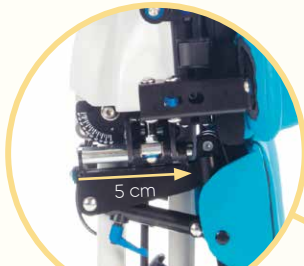

**Niveaueingleich**  
der Oberschenkelanlage kann  
einfach vorgenommen werden.

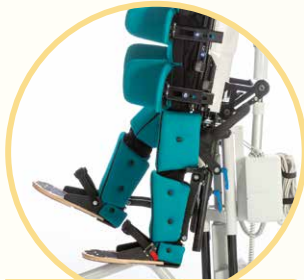

**Beinauflagen**  
können in der Version „Flex“  
gleichzeitig in der Länge und im  
Winkel verstellt werden.



**Höheneinstellung**  
erfolgt ganz einfach via Motor oder  
mit Gasdruckfederunterstützung.



**Fußstützen**  
können bis auf den Boden  
herabgelassen werden.



**Präzise Abduktion der Beine**  
ist von 0–30° via Stellschraube  
möglich.



„In diesem Video präsentiere ich unseren **till.** – das innovative,  
anpassungsfähige Rückenschrägliegebrett. Einfach den  
QR-Code scannen!“

**Jan Seekamp**  
Außendienstmitarbeiter & Ergotherapeut







### Ich bin Dein Schwenkarmbeckenrahmen.

Mit mir wird der Stehtrainer **todd.** noch flexibler und die Anwendung einfacher. Denn ich lasse mich stufenlos in der Tiefe verstellen. Mit meiner Handkurbel kannst Du eine zusätzliche Tiefeneinstellung vornehmen und so schrittweise aufgerichtet werden.

Mein Schwenkarmbeckenrahmen am **todd.** ist auch bestens geeignet, um eine Gesäß- und Rückenpelotte aufzunehmen. Damit werden Stehtraining und beispielsweise Muskelaufbau noch effektiver. Und überhaupt – mit den beiden großen Antriebsrädern beim **todd.** kommst Du überall hin – ganz selbstständig.





**Mein Verschluss ist besonders geschützt.  
Durch den Sicherungsmechanismus ist ungewolltes  
Öffnen ausgeschlossen! So kann ich problemlos in  
allen Einrichtungen eingesetzt werden.**



### **Mein Schwenkarmbeckenrahmen wird dich begeistern:**

Mit mir funktioniert das Ein- und Aussteigen in den **todd.** ganz einfach. Egal ob der Transfer vom Bett oder Rollstuhl stattfindet. Es gibt kein Hindernis für Dich oder Deine Betreuer. Denn mein Schwenkarm lässt sich mit wenigen Handgriffen leicht öffnen und wegklappen. Im geschlossenen Zustand schmiege ich mich an, ohne zu drücken. Gleichzeitig halte ich dich aber auch fest und geborgen. Damit ich mich nicht unbeabsichtigt öffne, gibt es mich mit Sicherungsmechanismus.

Rahmenfarben



Reinweiß



Dormant Rot



Lasuritblau  
metallic



Melonengelb



Anthrazit  
metallic



**Therapietisch**  
aus Plexiglas.

**Brustpelotte mit Seitenführung**  
ist in Höhe und Breite einstellbar.

**Mittelsäule**  
ist von 0° - 15° neigbar.

**Gurt**  
als Rückenstütze.

**Antriebsräder mit Greifreifen**  
für eine selbstständige Fortbewegung.

**Gesäßpelotte**  
kann abgenommen werden.  
Die Aufnahme kann für einen leichten  
Transfer abgeklappt werden.

**Radsturz**  
kann an die optimale Greifweite  
angepasst werden.



**Fußstützen**  
können in Höhe, Tiefe und im  
Winkel verändert werden.

**abduzierbare Rahmenform**  
bietet viel Platz für das  
Ein- und Aussteigen.

**federnde Abstützrollen**  
mit Feststellbremse.



*„In diesem Video erkläre ich die Highlights vom **todd.**, unserem wendigen Stehtrainer. Überzeugen Sie sich selbst!“*

**René Althaus**  
Leiter Außendienst



# hts. als Duschsitz.

## Ich bin Dein Dusch- und Toilettenstuhl und ein absoluter Wasser-Fan!

Mit meinen vielen verschiedenen Untergestellen begleite ich Dich bei allem, was Du im Badezimmer erledigen möchtest – ob Transfer, beim Einsatz als Toilettenstuhl oder in der Dusche. Innerhalb weniger Sekunden kannst Du meinen Sitz aber auch mit einem **Badewannenuntergestell** kombinieren und mich somit zu einem **praktischen Duschsitz** verwandeln. So biete ich Dir auch in der Badewanne oder in der Dusche Sicherheit und Komfort – bestimmt aber auch viel Spaß.

für den hts.  
in Größe  
1 und 2



## Das Badewannenuntergestell

reduziert meine Stellfläche und ermöglicht somit auch eine Nutzung in schmalen Badewannen.



**Auch in der Dusche mache ich als Duschsitz eine gute Figur.**





**Mein Sitz kann ganz einfach abgenommen und auf andere Untergestelle montiert werden. Ganz ohne Werkzeug!**



**Auch auf Reisen**  
musst Du nicht auf mich verzichten.

Mit der **Reise-Basis hts.** bist Du auch unterwegs immer unabhängig. Mit der dazugehörigen Tasche kannst Du mich auch einfach mit auf die Reise nehmen.



### **Mein Badewannenuntergestell wird dich begeistern:**

Mit mir kannst Du ganz bequem und angenehm in der heimischen Badewanne gewaschen, geduscht und gebadet werden. Das macht den ohnehin schon vielseitigen **hts.** noch vielseitiger. Ich kann einfach auf den Wannenboden gestellt werden und ermögliche bequemes Duschen und Haarewaschen in der Badewanne, ohne dass ein separater Duschstuhl für mich verwendet werden muss. Mein reduzierter Platzbedarf ermöglicht es, dass ich sowohl in schmalen als auch in breiten Wannen genutzt werden kann. Ich passe mich also optimal an Dein Zuhause an!



**Optimale Positionierungsmöglichkeiten**  
durch Positionierungshilfen wie Kopfstütze, Pelotten, Begurtungen, Abduktionskeil, ...



**Rückenwinkel**  
lässt sich ideal zur Pflege der Haare neigen.



**Zur Reinigung**  
können Sitz- und Rückenpolster ganz einfach entfernt werden.



**Sitz- und Rückenpolster**  
trocknen sehr schnell nach der Nutzung. Für eine einfache Erreichbarkeit von zum Waschen kritischen Stellen stehen verschiedene Sitzpolster zur Verfügung.



**Für verschiedene Einsatzbereiche**  
kann meine Sitzeinheit mit unterschiedlichen Untergestellen kombiniert werden.



*„In this video I discuss positioning concepts for toileting and demonstrate them using the hts. hygiene and toileting system.“*

**Lori Potts**  
Physiotherapeutin (Product and Training Specialist | Rifton)



# Fußschalen.

## **Ich bin die neue Fußschale mit Seitenführung.**

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir arbeiten gerne paarweise. Meine linke und rechte Fußschale verhindern bei Dir eine Innen- oder Außenrotation des Fußes. Deshalb bin ich zum Beispiel einfach in der Breite einstellbar und verschiebbar. Um Deine Füße in den Fußschalen zu sichern, sind diese mit Gurten versehen. Diese kannst Du mithilfe der Magnetschlösser verschließen – und zwar alleine. Mich gibt es als Fußschale mit Beinführung, die das Fußgelenk stabilisiert und so die Innenrotation des Beines reduziert. Oder möchtest Du mehr Bewegung? Dann kannst Du meine Fußschalen auch mit dynamischer Beinführung bekommen. Da sind die Einstellmöglichkeiten lediglich am hinteren Fußteil verbaut und nicht seitlich wie bei den Fußschalen mit Beinführung. Gleichzeitig bleibt die Stabilisierung des Fußgelenks erhalten. Also, schöne Grüße an die Füße.









## Deine neuen Fußschalen werden dich begeistern:

Ich biete Dir eine Seitenführung und verhindere somit eine Innen- oder Außenrotation Deiner Füße. Ich halte Dich also genau dort, wo Du es brauchst. Wenn Du noch ein wenig mehr Unterstützung benötigst, wählst Du mich einfach mit Beinführung. In der dynamischen Variante der Beinführung kann die Rotation der Beine sogar definiert zugelassen werden. Perfekt! Denn so kann eine starke Abduktion durch kürzere Beinlängen verhindert werden. Auch bleibt die Stabilisierung der Fußgelenke erhalten. Für maximale Selbstständigkeit sorgen meine neuen Verschlüsse: Das Öffnen und Schließen kannst Du dank Magnet-schloss alleine vornehmen. Denn die schnappen ganz einfach zu!



## Was ich alles kann:

- Innen- und Außenrotation verhindern
- das Fußgelenk stabilisieren
- selbstständig vom Kind/Jugendlichen verwendet werden
- Druckstellen vorbeugen durch weiche Gurte
- breite FußEinstellung für eventuelle Orthesen berücksichtigen

## AN DIESEN PRODUKTEN KOMME ICH ZUM EINSATZ:



**momo therapierad.**



**momo dreirad.**



**momo motion.**



**madita.**



**madita-fun.**



**sofie.**



*„Im Erklärvideo für das **momo.**-Zubehör zeige ich unter anderem unsere neue Fußschalen! Jetzt reinklicken!“*

**Sven Gibbels**

Außendienstmitarbeiter & Orthopädietechniker





# Kopfstütze.

## **Ich bin Deine Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung.**

Lass den Kopf nicht hängen. Mit mir ist eine verbesserte Kopfkontrolle möglich. Du kannst Deinen Kopf seitlich abstützen oder anlehnen. Dank meiner stufenlosen Einstellbarkeit erfolgt so eine sanfte Korrektur zur Mitte, also in Verlängerung der Halswirbelsäule. Diese wird prima entlastet. Und das bedeutet Schmerzen können vermieden oder reduziert werden und die Halswirbelsäule wird entlastet. So kannst Du Dich viel besser auf Aktivitäten wie Zuhören und Zuschauen konzentrieren. Auch das Essen wird erleichtert. Und durch die Winkelverstellung werden Beeinträchtigungen der Ohren und des Hörsinnes vermieden, ebenso wie eine Einschränkung des Sichtfelds. Also, lehn' Deinen Kopf an.





### **Deine neue Kopfstütze wird dich begeistern:**

Durch die Verstell- bzw. Anpassungsmöglichkeit werde ich schnell an Deinen Entwicklungsverlauf angepasst. Also mehr Führung für Dich, falls sich Deine Kopfkontrolle eben doch mal verschlechtert. Oder weniger Führung, wenn du Deinen Kopf wieder aktiver halten kannst. Je nach Situation kannst Du so Deine Halsmuskulatur trainieren. Einen besonderen Vorteil bietet ich Dir, wenn du Epileptiker\*in bist. Denn an Deinen Schutzhelm passe ich mich an. Oder eben an die Maße Deines Kopfes. Besonders geeignet bin ich für Dich, wenn du eingruppiert bist in die GMFCS Klassen 3 und 4.

# Kopfstütze.



## Mehr Möglichkeiten der optimalen Positionierung:

An unserem Rückenschrägliegebrett **till.** werde ich mit Hilfe eines Kugelkopfes montiert. Dadurch kann man mich noch optimaler positionieren und somit genau in die Position bringen, die gerade benötigt wird. Natürlich kann man mich auch am **till.** ganz einfach in der Höhe und Tiefe verstellen, damit Dein Kopf zu jeder Zeit optimal gestützt wird. Einfach genial – erst recht in Verbindung mit meinen unabhängig voneinander winkelverstellbaren Seitenführungen, oder?



## Was ich alles kann:

- Kopfkontrolle verbessern
- Pathologische Reflexe hemmen (ATNR = Asymmetrisch tonischer Nackenreflex, STNR = Symmetrisch tonischer Nackenreflex)
- Pathologische Positionen und Bewegungsmuster vermeiden
- Folgeschäden vermeiden
- Atmung verbessern
- Nahrungsaufnahme erleichtern
- Sicherheit und Komfort vermitteln
- Aufmerksamkeit verbessern
- Visuelle und auditive Wahrnehmung verbessern
- Kommunikation verbessern
- Soziale Interaktion erleichtern
- Inklusion ermöglichen



## AN DIESEN PRODUKTEN KOMME ICH ZUM EINSATZ:




**madita.**




**madita-fun.**



**madita hd.**

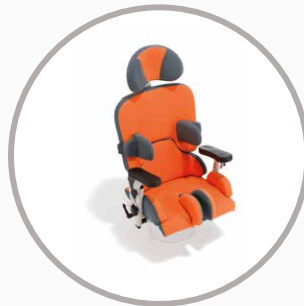

**sofie.**

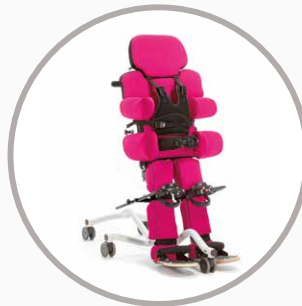

**till.**



*„Die neue Kopfstütze ist eine sinnvolle Ergänzung für „meine“ Patienten. Besonders überzeugt bin ich von der schnellen Einstellbarkeit, die es ermöglicht auf Veränderungen in der Entwicklung des Kindes zu reagieren. Mehr Informationen gibt es im Video!“*

**Nadine Gallenbach**

Außendienstmitarbeiterin & Physiotherapeutin



**Ich bin die neue flexible Kniepelotte.** Ich helfe Dir beim Stehen. Ich stabilisiere und korrigiere Dich bei der Benutzung unserer Stehtrainer **todd**, **till** oder **tim**. Und dafür haben sich meine Entwickler eine ganze Menge einfallen lassen. Ich lasse zum Beispiel keinen Druck zu. Durch meine Funktionsweise stütze ich sowohl in die vordere als auch seitliche Richtung. Die beiden Beinlagen passen sich der Form des Knies an. Das ermöglicht eine stufenlose Winkeleinstellung in jede Richtung. Zusätzlichen Halt geben Dir meine gepolsterten Bügel. Durch das bewegliche Kugelgelenk sind selbst kleinste Bewegungen kein Problem. Durch meine hautsympathischen und pflegeleichten Materialien, wie den Jersey-Stoff, das Neopren und den Klettverschluss biete ich Dir einen angenehmen Tragekomfort.









### Deine neuen Kniepelotten werden dich begeistern:

Ich biete Dir genau die Stabilität, die Du eventuell aufgrund Deines niedrigen Muskeltonus oder wegen eines lockeren Bandapparates hast. Zum Einsatz komme ich bei Hypotonien, Trisomie 21, Muskeldystrophien und vielen Krankheitsbildern mehr. Ich korrigiere Dich bei Kontrakturen und abweichender Gelenkform bei Cerebralparese oder neurodegenerativen Erkrankungen. Ich bin besonders anschmiegsam und biete eine flächige Druckverteilung und halte auch großem Zug stand. Das macht mich zu einem belastbaren Helfer. Meine große Flexibilität lässt die Bewegung der Muskulatur zu. Klar, denn die ist es ja, die ich aktivieren, trainieren und dehnen will!



### Was ich alles kann:

- anatomische Funktionsweise des Kniegelenks genau abbilden
- differenzierte Druckverteilung über einzeln verstellbare Gurte ober- und unterhalb des Knies
- Druckstellen vermeiden
- Patella aussparen
- Schmerzen vorbeugen
- flexibel an das Knie anpassen
- in die vordere Richtung und auch seitlich stützen
- kinderleicht in der Länge verstellt werden
- Muskulatur aktivieren, trainieren und dehnen
- Stehzeiten verlängern
- Hüfte, Knie und Sprunggelenk physiologisch belasten

## AN DIESEN PRODUKTEN KOMME ICH ZUM EINSATZ:



**till.**



**todd.**




**tim.**



*„In der Entwicklung der neuen, flexiblen Kniepelotten steckt echt viel Herzblut. Muskuläre und knöcherne Funktionen zu berücksichtigen, das war unser Fokus. Und das ist uns sehr gut gelungen! Eine kleine Vorschau gibt es im Video!“*

**Andrea Espei,**  
Schulungsleiterin & Ergotherapeutin



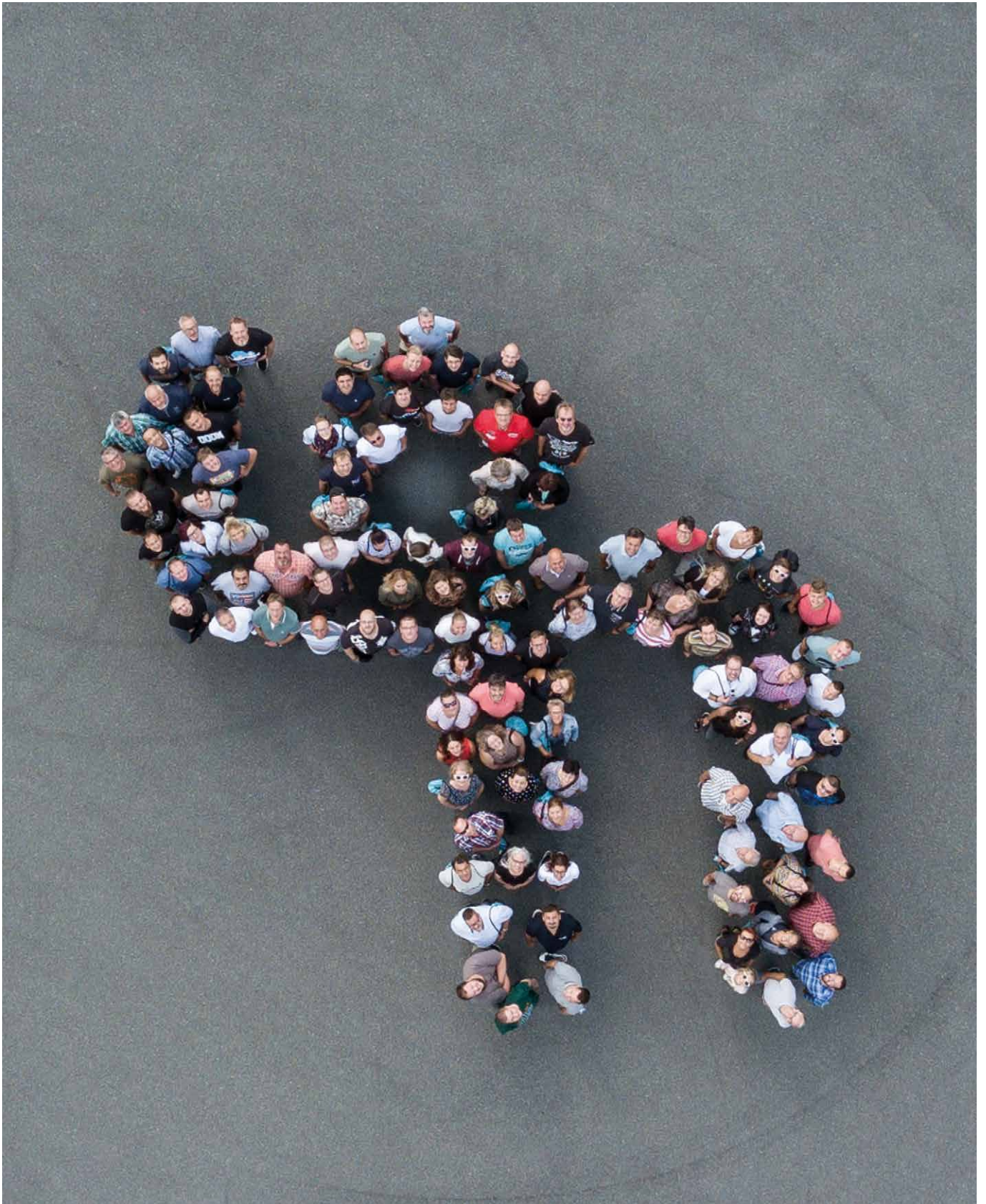

**Wir sind schuchmann.**





**Hallo, wir sind Miriam und Torsten Schuchmann. Wir führen unseren Familienbetrieb in zweiter Generation und unser Unternehmen hat inzwischen mehr als 30 Jahre Erfahrung darin, Kinder-Rehatechnik zu fertigen und zu vertreiben.**

Was uns dabei am Herzen liegt: Kinder mit individuellen Bedürfnissen so optimal, wie es nur irgendwie möglich ist, zu unterstützen – mit Produkten, die genauso individuell sind wie sie.

**Was uns bewegt.**

Dass wir uns gerade in der Kinder-Rehatechnik stark machen, hat seinen Ursprung in unserer eigenen Familie. Denn wir wissen, was es heißt, einen mehrfach schwerstbehinderten Menschen zu begleiten.

Als Miriams Schwester klein war, steckte allerdings auch die Rehatechnik noch in den Kinderschuhen. Ihre Eltern wussten, was man verbessern musste, um ihrer Tochter die Teilhabe am Alltag zu ermöglichen. Die Geschäftsidee war geboren.

**Was wir bewegen.**

Unser Anspruch ist es, Kinder mit Behinderungen so zu unterstützen, dass sie mobiler und selbstständiger werden. Gleichzeitig geht unsere Aufgabe noch viel tiefer. Unser mittlerweile über 100-köpfiges Team arbeitet eng mit Fachhändlern, Ärzten und Therapeuten zusammen, um uns genau in die Bedürfnisse des Kindes und deren Familien hineinzudenken. Eine sehr bewegende Geschichte, für alle Beteiligten.

Deshalb sind auch unsere Produkte mehr als nur Produkte. Sie werden zum Weggefährten fürs Leben. Und zu guter Letzt wollen wir Bewegung in den Markt bringen – mit echten Innovationen in der Rehatechnik, die höchste Ansprüche an Funktionalität, Design und Sicherheit erfüllen.

Bei Fragen oder Anregungen zu allgemeinen Themen oder zu unseren Produkten stehen wir – und natürlich auch das gesamte Schuchmann-Team – Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



# Termine.

## November 2021.

**Seminar „Produktpalette“**  
26. + 27. November 2021

Schuchmann GmbH & Co. KG  
Rudolf-Runge-Str. 3  
49143 Bissendorf

## März 2022.

**FOCUS CP-rehaKIND-Kongress  
– gemeinsam unterwegs –**  
23. – 26. März 2022

Dortmunder Westfalenhalle  
Rheinlanddamm 200  
44139 Dortmund

**Gastseminar „Biomechanik 1+2“**  
30. März – 02. April 2022

Schuchmann GmbH & Co. KG  
Rudolf-Runge-Str. 3  
49143 Bissendorf

## Mai 2022.

**Messe IRMA – Internationale Reha- und  
Mobilitätsmesse für Alle –**  
05. – 07. Mai 2022

Hamburg Messe- und Congress  
Halle A3  
20357 Hamburg

## Juni 2022.

**Messe REHAB – Die Fachmesse für  
mehr Lebensqualität –**  
23. – 25. Juni 2022

Messe Karlsruhe  
Messeallee 1  
76287 Rheinstetten

## September 2022.

**Messe REHACARE – Selbstbestimmt leben –**  
14. – 17. September 2022

Am Staad (Stockumer Höfe)  
40474 Düsseldorf

Und viele mehr... Unter [www.schuchmann.de/termine](http://www.schuchmann.de/termine) finden Sie eine stets aktuelle Übersicht unserer anstehenden Termine und Veranstaltungen. Schauen Sie doch mal rein!

**Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen!**

## Wir sind ein Teil der internationalen Fördergemeinschaft für Kinder- und Jugend-Rehabilitation.

Seit dem Jahr 2000 engagiert sich die Internationale Fördergemeinschaft rehaKIND e.V. für die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Handicap.

Die Versorgung dieser Kinder mit Therapien und Hilfsmitteln ist ein besonders sensibler Bereich in der Rehabilitation: Interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Beteiligten ist gefordert – Kompetenz sorgt für Vertrauen.

Das Ziel dieser Fördergemeinschaft ist eine Optimierung des Versorgungsprozesses, qualitätsgesicherte Wege und eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Mittel.

Darüber hinaus steht die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, Organisationen, Wissenschaft und Forschung in der Kinder- und Jugend-Rehabilitation im Fokus.

Als Gründungsmitglied sind uns daher die Zusammenarbeit und der Austausch mit rehaKIND von großer Bedeutung. Über diese Fördergemeinschaft erhalten wir als Hersteller von RehaHilfsmitteln wichtige Impulse zur qualitativen Verbesserung unserer Produkte. Dies ermöglicht uns, den individuellen Herausforderungen einer modernen Hilfsmittelversorgung gerecht zu werden.

Wir möchten an dieser Stelle rehaKIND für das große Engagement zur Förderung von behinderten Kindern und Jugendlichen danken und freuen uns, ein Mitglied dieser Fördergemeinschaft zu sein.

Weitere Informationen zu rehaKIND finden Sie unter [www.rehakind.com](http://www.rehakind.com).



# rehaKIND. Sichert Chancen für alle Kinder.





**schuchmann.de**